


Soa test - urine

Deze test is voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Voor de test vangt u het eerste deel van uw urine op. U kunt de test op ieder moment van de dag doen.


STD test - urine

This test serves to diagnose sexually transmitted diseases (STDs). To do the test, you must collect a sample of the first part of your urine stream. You can collect this sample at any moment during the day.


F. Inpakken en versturen / Wrap and send

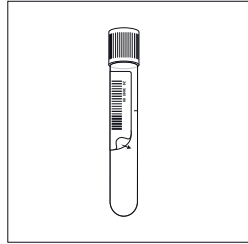

9. Plak de barcode 'A urine microbio olijfgroen' recht op de buis zoals de afbeelding.
Stick the barcode 'A urine microbio olijfgroen' on the tube, as shown in the image.

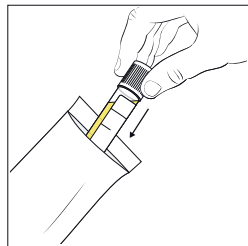


10. Stop het buisje in het witte zakje.
Place the tube into the white bag.

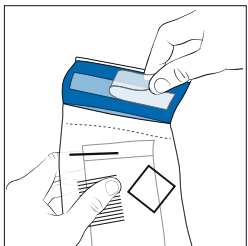


11. Doe het witte zakje met buisje daarna in de speciale plastic zak (Safetybag). Plak deze dicht met de plakrand.
Place the white bag with the tube into the special plastic bag (Safetybag). Close the bag using the adhesive strip.


the special plastic bag (Safetybag). Close the bag using the adhesive strip.

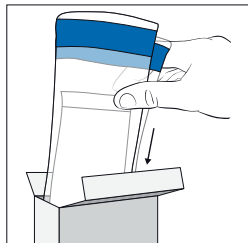

12. Stop de goed afgesloten Safetybag in de doos en sluit de doos.
Place the well-sealed Safetybag in the box and close the box.

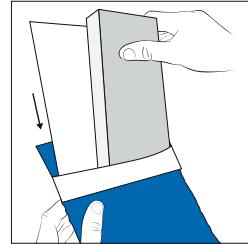

13. Doe de doos en het aanvraagformulier van uw arts in de verzendenvelop. Plak deze dicht met de plakrand.
Place the box and your doctor's request form into the return envelope. Close the envelope using the adhesive strip.

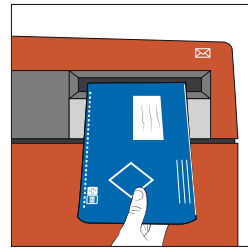

14. Belangrijk: Doe de verzendenvelop nog dezelfde dag op de post*, vóór de brievenbus geleegd wordt. Een postzegel is niet nodig.
Important: You must post the return envelope the same day, before the last collection. You do not need a stamp.*

* Lukt het niet om de envelop binnen 24 uur te versturen? Bewaar het materiaal dan in de koelkast totdat verzenden wel mogelijk is.

* If you are unable to send the envelope within 24 hours, store the material in the fridge until you are able to send it.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw (huis)arts of ons Klant Contact Centrum. Het Klant Contact Centrum van RHMDC is te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur op 088 260 4000.

Questions?

If you have any questions, please contact your doctor/GP or our Customer Contact Centre. The RHMDC Customer Contact Centre is available from Monday to Friday, from 8 a.m. to 5 p.m., tel. 088 260 4000.

A. Inhoud van de doos

- De gebruiksaanwijzing
- Barcodevel
- Aanvraagformulier
- Buisje
- Pipet
- Wit zakje
- Plastic zakje
- Verzendenvelop

B. Belangrijk

Lees de hele uitleg

Volg stap 1 t/m 13.

Maak de buis pas open als u met de test begint. Zorg dat u, voordat u de urine opvangt, minstens 1 uur niet heeft geplast.

A. Package content

- Instruction leaflet
- Barcode sheet
- Request form
- Tube
- Pipette
- White bag
- Plastic bag
- Return envelope


B. Important

Read the explanation in full


Carry out steps 1 to 13.

Do not open the tube until you are ready to start the test. Ensure that you have **not** passed urine for at least 1 hour, before you collect the urine for the test.


C. Voorbereiding / Preparation

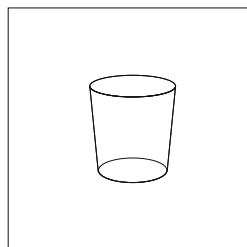

1. U heeft een schoon en droog potje nodig om in te plassen.
You will need a clean and dry jar to pass urine into.

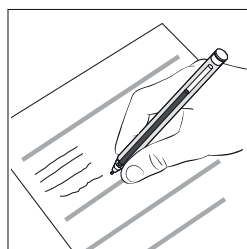


2. Controleer of uw gegevens zijn ingevuld op het aanvraagformulier en vul deze eventueel aan. Noteer op het aanvraagformulier de afnamedatum en – tijd waarop u de urine heeft opgevangen.
Check whether your data have been entered onto the request form and if necessary complete them. On the request form, note the test date and time when you collected the urine.

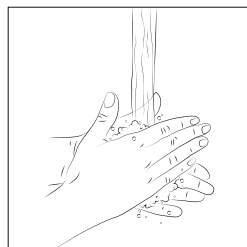


3. Was uw handen met water en zeep. Droog uw handen met een schone handdoek. Werk zo schoon mogelijk.
Wash your hands using water and soap. Dry your hands with a clean towel. Try to work as clean as possible.

D. Urine opvangen / Collecting urine

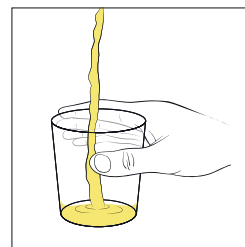


4. Vang de eerste straal urine op in het potje. U kunt daarna verder plassen in het toilet.
Collect the first stream of urine in the jar. Then carry on passing urine into the toilet.

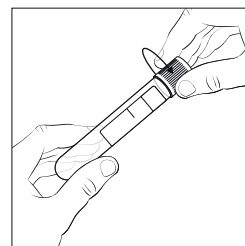


5. Pak het busje en haal de dop eraf. Maak het busje niet leeg.
Take the tube and remove the lid. Don't empty the tube.


E. Urine in het busje / Putting urine into the tube

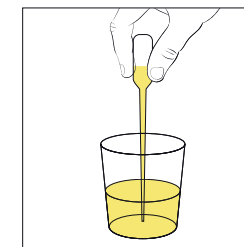


6. Pak de pipet en het potje met urine. Doe de punt van de pipet in de urine. Knijp in de bovenkant van de pipet en laat los. Zo zuigt u de urine op.
Take the pipette and the jar containing the urine. Stick the tip of the pipette into the urine. Squeeze the top of the pipette and let go. The urine will be sucked into the pipette.

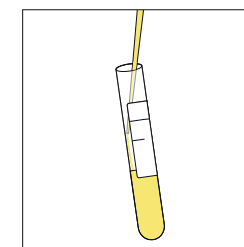

7. Steek de pipet in het busje. Knijp in de bovenkant van de pipet. De urine stroomt nu in het busje.
Stick the pipette into the tube. Squeeze the top of the pipette. The urine will flow into the tube.

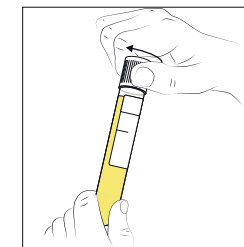

8. Het busje moet tot de bovenkant van de sticker gevuld worden met urine. Draai of druk de dop goed vast.
The tube must be filled to the top of the sticker with urine. Twist or push the lid on firmly.

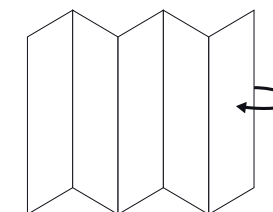

De uitleg staat op de voor- en achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

The explanations are on the front and back of this instruction leaflet.